



Figur 1. Fest fettuttømmingsslangen til undersiden av LipoFilter. Sjekk at slangen er festet godt på beholderen og lukk klemmen.

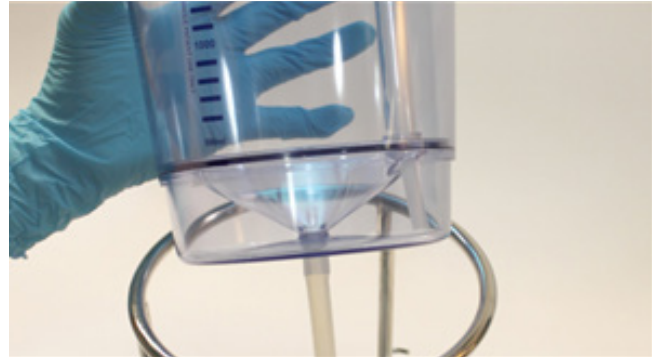


Figur 2. Sett beholderen i stativet. Sjekk at den sitter riktig og ikke heller.

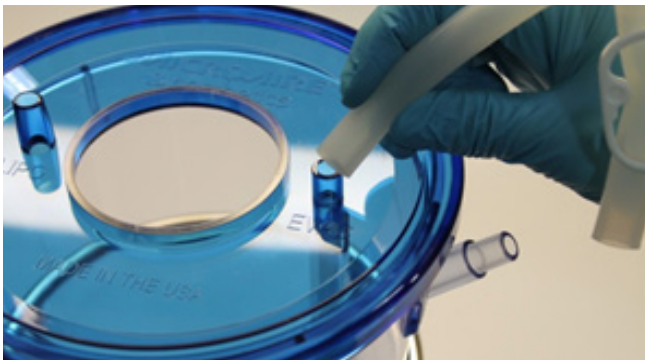

Figur 3. Fest Y-konnektorens slange **uten** klemme til porten "EVAC" (uttømming).




Figur 4. Fest Y-konnektorens slange **med** klemme til porten "CLAMP" (klemme). Klemmen skal være helt åpen under høstingen av fett. Sjekk at slangen ikke er vridd eller ødelagt.

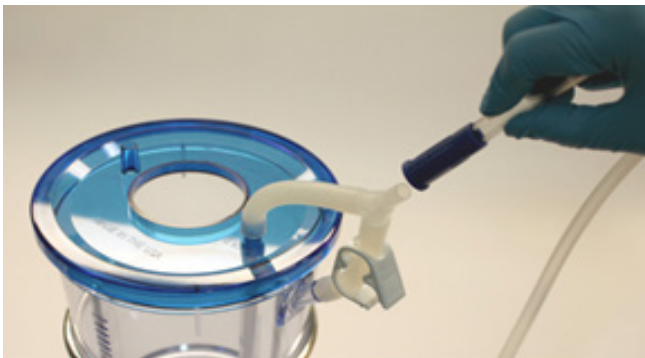


Figur 5. Fest væskeuttømmingsslangen til Y-konnektoren. Fest den andre enden til avfallsbeholderen.



Figur 6. Væskeuttømmingsslangen festes så i "Pigtale"-kroken for å forhindre at Y-konnektoren klapper sammen.

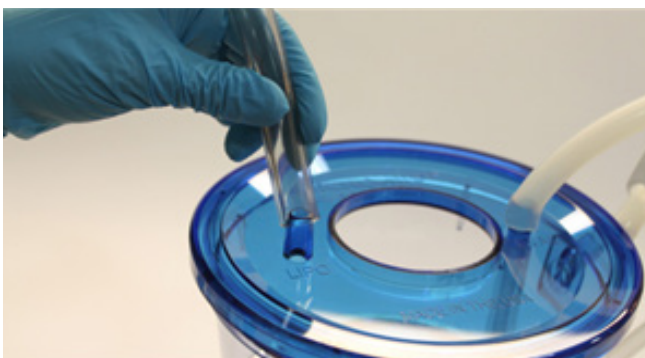


Figur 7. Fest fettsugingsslangen til porten merket "LIPO" (liposuction) på beholderens lokk. Fest den andre enden av slangen til kanylen/håndstykket.

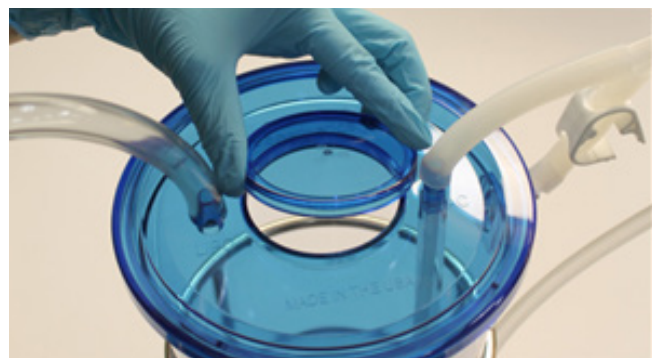

Figur 8. Fyll beholderen med 500 ml sterilt saltvann eller Ringer-lactat oppløsning gjennom den åpne porten på toppen og sett deretter på lokket. OBS: Bruk ikke sterilt vann, da dette kan skade fettcellene.

Slå på aspiratoren, klem liposuctionslangen manuelt for å unngå luftflow og still inn vakuumnivået til ca. 457 mm Hg. OBS: Innsamling med høyere vakuüm enn 457 mm Hg vil minske cellenes leve-dyktighet vesentlig. ADVARSEL: Overstig ikke 559 mm Hg vakuüm. Overstigelse kan medføre at produktet ødelegges.

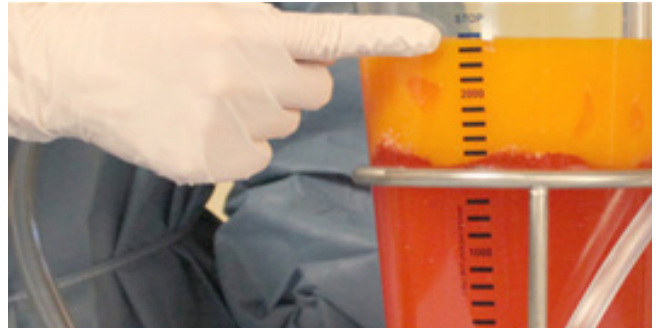

Figur 9. Begynn innsamling. OBS: Ikke fyll beholderen over 2500 ml markøren. Angitt som "STOP". La fett og væske skilles før det gjøres forsøk på å suge ut væskene. Ca. 12 minutter.



Figur 10. Senke væsknivået ved å fjerne kanylen fra pasienten og lukke klemmen på Y-konnektoren. Slå på vakuüm. Væsken renner ned i avfallsbeholderen. Åpne klemmen på Y-konnektoren eller steng vakuüm for å stanse væskeutsugingen. Stans uttømming når all væske er tømt fra det nedre kammeret ved å stenge vakuümet og åpne klemmen på Y-konnektoren.



Figur 11. Slik tas fett ut: Fjern slangen fra porten merket "LIPO" (liposuction) og la porten være åpen. Fest 60 ml Toomey-sprøyten og fettuttømmingsslangen sammen til de klikker på plass.



Figur 12. Åpne klemmen på fettuttømmingsslangen og trekk ut den siste væsken som er i slangen. Lukk klemmen og fjern væsken. Husk å lukke klemmen, før du tar av sprøyten.



Figur 13. Fest Toomey-sprøyten igjen, åpne klemmen, trekk fett ut, lukk klemmen og ta av sprøyten. Fortsett prosessen inntil ønsket mengde fett er samlet. Husk å lukke klemmen før du tar av sprøyten. Hvis det skal høstes mer vev, fyller LipoFilter igjen med 500 ml sterilt saltvann eller Ringer-lactat-oppløsning og fremgangsmåten gjentas.