


## Måletabell BH og kompresjonstøy - Kvinner

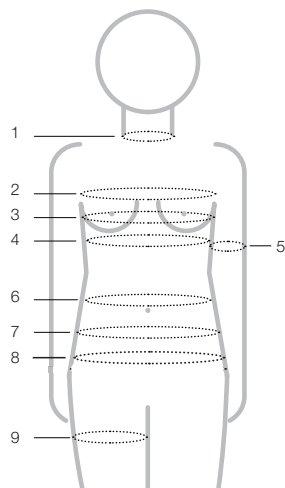

1. Omkrets rundt hals/nakke
2. Omkrets over bryst (anatomiske brystbånd og sportsmodeller: D)
3. Omkrets over busten
4. Omkrets under busten
5. Omkrets overarm
6. Omkrets midje
7. Omkrets mage (ca 3-4 cm under navle)
8. Omkrets hofte
9. Omkrets lår (mellom skritt og kne)

Måletabell B Body borrelås/hekter Modell: , 3007, 4008, 4002KT-2	
Størrelse	Mage (7)
XXS	60-70
XS	70-80
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130

Måltabell D Anatomisk brystbånd Modell: 2105	
Str.	fra armhule over bryst (2)
S	74-83
M	83-92
L	92-101
XL	101-116

Måletabell A : Kompresjonsklær med ben kvinner Modell: 3002, 3004, 3006, 3009, 3011, 3012, 3104, 3109				
Størrelse	Midje (6)	Hofte (8)	Lår (9)	
70 (XXXXS)	54-58	80-85	43-46	
75 (XXXS)	58-64	85-90	46-49	
80 (XXS)	64-68	90-95	49-52	
85 (XS)	68-72	95-100	52-55	
90 (S)	72-76	100-105	55-58	
95 (M)	76-80	105-110	58-61	
100 (L)	80-85	110-115	61-64	
105 (XL)	85-90	115-120	64-67	
110 (XXL)	90-95	120-125	67-69	
115 (XXXL)	95-100	125-135	69-71	


Måletabell A2: Second stage Plagg (Figurforming) Modell: Slimng03, Slimng04, Slimng07, Slimng09, Slimng601, Slimng602				
Størrelse	Midje (6)	Hofte (8)	Lår (9)	
XS	63-70	80-85	44-47	
S	70-77	85-95	47-50	
M	77-84	95-105	50-55	
L	84-91	105-115	55-59	
XL	91-98	115-125	59-64	
XXL	98-105	125-135	64-69	

Måletabell C: BH - For de fleste måles det kun under bryst. Modell: 2011, 2012, 2001, 2040, 2060, 2045				
Størrelse	Under busten (4)	Over busten (3) B cup	Over busten (3) C cup	Over busten (3) D cup
80 (XXS)	63-67	78-82	82-85	85-88
85 (XS)	68-72	83-87	87-90	90-93
90 (S)	73-77	88-92	92-95	95-98
95 (M)	78-82	93-97	97-100	100-103
100 (L)	83-87	98-102	102-105	105-108
105 (XL)	88-92	103-107	107-110	110-113
110 (XXL) *	93-97	108-112	112-115	115-118
115 (XXXL) *	98-102	113-117	117-120	120-123
120 (XXXXL) *	103-107	118-122	122-125	125-128
125 (XXXXXL) *	108-112	123-127	127-130	130-133

\* BH-størrelse 110-125 fås kun i Mima-2001 N

## Måletabell kompresjonstøy - Menn

Måletabell E Vest, bukser og drakt for menn Modell: 2006, 5006, 5008, 5106, 4001KT-2, 3002, 3006, 3007, 3011				
Størrelse	Maksimum Bryst-	Midje (6)	Lår (9)	
70 (XXXXS)	85-90	75-80	41-43	
75 (XXXS)	90-95	80-85	43-46	
80 (XXS)	95-100	85-90	46-49	
85 (XS)	100-105	90-95	49-52	
90 (S)	105-110	95-100	52-55	
95 (M)	110-115	100-105	55-58	
100 (L)	115-120	105-110	58-61	
105 (XL)	120-125	110-115	61-64	
110 (XXL)	125-130	115-120	64-67	
115 (XXXL)	130-135	120-125	67-70	

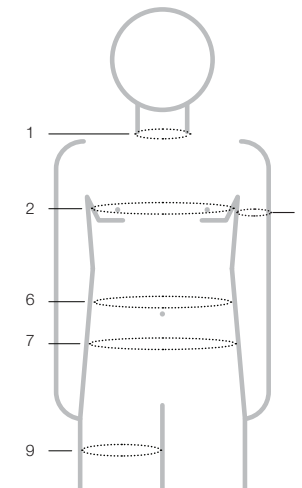

1. Omkrets hals/nakke
2. Omkrets brystkasse
5. Omkrets overarm
6. Omkrets midje (over hofte)
7. Omkrets nedre del av mage
9. Omkrets lår (mellom kne og skritt)

**FORKLARING TIL MÅL (Gjelder alle). NB: Ikke stram målebåndet.**

**Midjemål:** Mål mellom ribbein og hofte. Dersom det er vanskelig å finne riktig sted, be kunden sette hånden på hoften og ribbein og mål midt i mellom.

**Magemål:** 3-4 cm under navlen.

**Hoftemål:** I de fleste tilfeller er dette det viktigste målet. Mål direkte på hoften under midjen. Dersom det er vanskelig å finne riktig sted, be kunden sette hånden på riktig sted. Hos noen er hoftemål slik bildet viser, hos andre kan det være i samme høyde som navle.

**Overarm:** Måles midt på overarmen, mellom armhull og albue.

Gi ALLTID en størrelse større en hva målet viser.

**NB:** Ved store kirurgiske inngrep øker risikoen for blodpropp. Vi anbefaler kompresjonsstrømper som supplement for god sirkulasjon i tilhelsingsperioden. Selges hos bandagister og de fleste store apotek.

## Måletabell kompresjonstøy - Unisex

Måltabell F Magebelte/Brystbelte 4023, 4034, 4013, 4015	
Størrelse	Magebelte (7)
XS	50-70
S	70-90
M	90-110
L	110-130
XL	130-150

Måltabell G Armkompresjon Modell: 1008Z, 1009		
Størrelse	Overarm (5)	Under busten (4)
XS	21-24	63-70
S	24-27	70-77
M	27-30	77-84
L	30-33	84-91
XL	33-36	91-98
XXL	36-40	98-105

Måletabell H Ansikts-/ hodebandasjer Mod: 1002, 1003, 1004	
Størrelse	Hals/nakke (1)
S	27-31
M	32-37
L	38-46

Alle mål er oppgitt i cm