


UNNGÅ SYNLIGE ARR VED HJELP AV MEDISINSK SILIKON

Snakk med oss om
NewGel arrbehandling

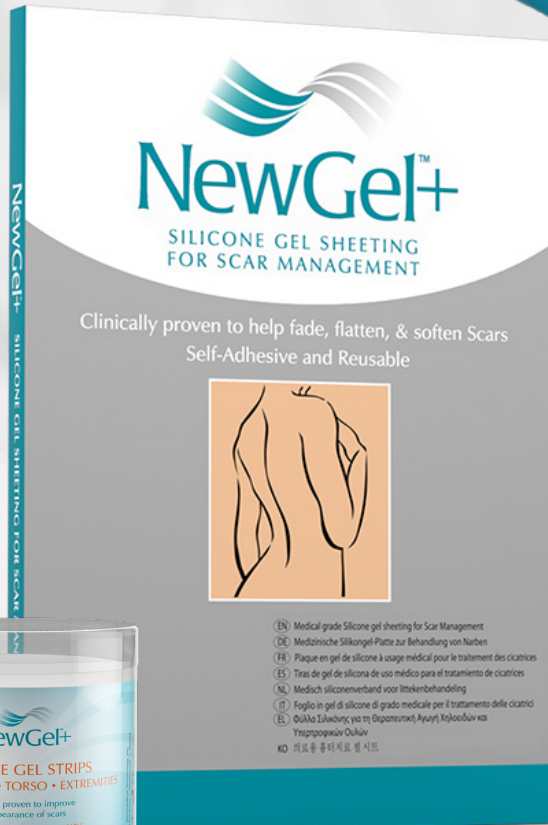

- (EN) Medical grade Silicone gel sheeting for Scar Management
- (DE) Medizinische Silikongel-Platte zur Behandlung von Narben
- (FR) Plaque en gel de silicone à usage médical pour le traitement des cicatrices
- (ES) Tiras de gel de silicona de uso médico para el tratamiento de cicatrices
- (NL) Medisch siliconenverband voor littekenbehandeling
- (IT) Foglio in gel di silicone di grado medicale per il trattamento delle cicatrici
- (EL) Ουλκώ Λιλάκινη για τη Θεραπευτική Αγωγή Κηλίδων και Ψευδοκηλίδων
- (KO) 의료용 실리콘 젤 시트

NewGel+ reduserer eller flater ut nye og gamle arr

Hva er NewGel+?

NewGel+ er et medisinsk silikonplaster eller silikongel på tube som reduserer eller flater ut nye og gamle arr. Plasteret er selvklebende. Plaster og gel påføres direkte på arret.

Hvordan virker NewGel+?

NewGel+ reduserer, flater ut og mykgjør arr. Virkningen oppnås ved at plasteret beskytter arret mot luft og tilfører fuktighet. Huden under plasteret tilføres et jevnt lett trykk og temperaturen holdes jevn. (Det er ikke noe som trenger inn i huden, hverken fra plaster eller gel)

Til hvilke type arr kan du bruke NewGel+?

Silikonplaster/gel kan brukes på alle typer arr, både gamle og nye:

- Keloide arr
- Traume
- Brannskade
- Keisersnitt
- Hypertrofiske arr
- Generell kirurgi
- Kosmetiske arr
- Arr etter kviser

Er NewGel+ klinisk dokumentert?

NewGel+ er klinisk dokumentert og det er utført over 100 kliniske studier som bekrefter effekten. Dokumentert effekt hos en rekke klinikker over hele verden.

Hva er det som gjør NewGel+ så spesielt?

- NewGel+ er laget av medisinsk silikon som er produsert for å gi de beste resultater. NewGel+ silikonplaster er komfortabelt å ha på, sitter godt og har lang holdbarhet.
- Silikonen tilfører fuktighet, jevn temperatur og trykk på huden, som gjør at arrene "leges" av seg selv.
- NewGel+ er FDA-godkjent for arrbehandling.

Hvilket NewGel+ produkt skal du velge?

NewGel+ silikonplaster brukes gjerne på større arr og de spesialområdene de er laget for.

NewGel+ silikongel egner seg f.eks til små arr og arr som er utsatt for mye bevegelser. Silikongel egner seg spesielt godt til bruk i ansikt og hender. NewGel+ UV brukes til solutsatte steder.

Hvordan brukes NewGel+ silikonplaster og silikongel

- Fjern beskyttelsespapiret og legg silikonplasteret direkte på arret.
- Silikonplaster og silikongel skal ikke brukes på åpne sår. Kun på lukkede sår, hvor stingene er fjernet.
- Silikonplaster/silikongel bør brukes hver dag i minimum 6-8 timer, helst 24 timer i døgnet. Jo lengre NewGel+ er i kontakt med arret, jo bedre effekt.
- Silikonplaster bør tas av en gang i døgnet for å «lufte» arret og for eventuelt å vaske og tørke området.
- Silikongelen smøres direkte på arret. Det skal kun smøres på et tynt lag. Vent med å dekke til med tøy til gelen er tørket. Make-up kan brukes som vanlig når gelen er tørket.
- Ikke bruk silikongel under plasteret. Silikongelen vil føre til at plasteret mister evnen til å feste seg til huden.
- Silikonplasteret brukes om igjen i inntil fire uker. Om plasteret blir skittent eller mister sin klebelighet, kan det vaskes lett i springvann med mild håndsåpe. Lufttørkes før man legger det på igjen. Klebrigheten kommer tilbake når plasteret er tørket. Rens arret og la det lufttørke før du setter plasteret på igjen. Det er ikke nødvendig å vaske plasteret hver gang du tar det av, kun når det begynner å miste hefteevnen (hefteevnen påvirkes av rester etter hudceller, hår og lo). Dersom plasteret tildekkes av tøy, kan det være lurt å legge et tynt gasbind rundt plasteret for å unngå at det forskyves/løser.
- Du vil kunne se resultater allerede etter 3 uker. Best resultat oppnås etter minimum 3 måneder.

Studier:

Traume



Før NewGel+



Etter 4 måneder med NewGel+

Åpen hjertekirurgi



2 uker etter operasjon



Etter 4 måneder med NewGel+

Kirurgi hudkreft




3 dager etter operasjon




Etter 4 måneder med NewGel+

Brystrekonstruksjon

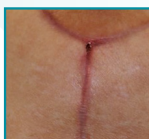


2 uker etter operasjon

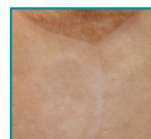

Etter 7 uker med NewGel+


Produktoversikt

NG-301
12,7x15,2 cm
(1 pr box)

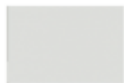

NG-370
Stor firkant
25,4 x 61 cm
(1 pr box)

Bestillingsvare
Lang leveringstid

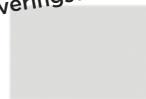

NG-301s
2,5x15k,2 cm
(4 pr box)




NG-360
Operasjonssnitt
5,1 x 20 cm
(2 pr box)



NG-320
Sirkel
(1 par pr box)



NG-364
Mage 5,1 x 61 cm
(1 pr box)

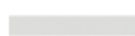

NG-326
Anker
(1 par pr box)



NG-380
Dot 2,5 cm
(6 stk pr box)



15 g NGO-8015
NewGel+UV Silikongel
m/ UV beskyttelse



15 g NGO-800
NewGel+E Silikongel
med vitamin E



30 g NGO-810
NewGel+E Silikongel
med vitamin E

MEDISTIM

Medistim Norge AS - www.medistim.no/forhandlere/