

# UNNGÅ STYGGE ARR

## VED HJELP AV MEDISINSK SILIKON



**KLINISK DOKUMENTERT ARRBEHANDLING MED  
SELVKLEBENDE SILIKONPLASTER / SILIKONGEL**

# NewGel+ reduserer eller fjerner nye og gamle arr

## Hva er NewGel+?

NewGel+ er et medisinsk silikonplaster eller silikongel på tube som reduserer eller fjerner nye og gamle arr. Plasteret er selvklebende. Plaster og gel påføres direkte på arret.

## Hvordan virker NewGel+?

NewGel+ reduserer, flater ut og mykgjør arr. Virkningen oppnås ved at plasteret beskytter arret mot luft og tilfører fuktighet. Huden under plasteret tilføres et jevnt lett trykk og temperaturen holdes jevn.

## Til hvilke type arr kan du bruke NewGel+?

Silikonplaster/gel kan brukes på alle typer arr, både gamle og nye:

- Keloide arr
- Traume
- Brannskade
- Keisersnitt
- Hypertrofiske arr
- Generell kirurgi
- Kosmetiske arr
- Arr etter kviser

## Er NewGel+ klinisk dokumentert?

NewGel+ er klinisk dokumentert og det er utført over 100 kliniske studier som bekrefter effekten. Dokumentert effekt hos en rekke klinikker over hele verden.

## Hva er det som gjør NewGel+ så spesielt?

- NewGel+ er laget av medisinsk silikon som er produsert for å gi de beste resultater. NewGel+ silikonplaster er komfortabelt på, sitter godt og har lang holdbarhet.
- Silikonen gir optimal beskyttelse. Den tilfører fuktighet, jevn temperatur og trykk på huden.
- NewGel+ er FDA-godkjent for arrbehandling.

## Hvilket NewGel+ produkt skal du velge?

NewGel+ silikonplaster brukes gjerne på større arr og de områdene plastrene er tiltenkt.

NewGel+ silikongel egner seg f.eks til små arr og arr som er utsatt for mye bevegelser. Silikongel egner seg spesielt godt til bruk i ansikt. NewGel+ UV brukes til solutsatte steder.

## Hvordan brukes NewGel+ silikonplaster og silikongel


- Fjern beskyttelsespapiret og legg silikonplasteret direkte på arret.
- Silikonplaster og silikongel skal ikke brukes på åpne sår. Kun på lukkede sår hvor stingene er fjernet.
- Plaster/gel bør brukes hver dag i min. 6-8 timer, helst 24 timer i døgnet. Jo lengre NewGel+ er i kontakt med arret, jo bedre effekt.
- Silikonplaster bør tas av en gang i døgnet for å «luftte» arret og for eventuelt å vaske og tørke området.
- Silikongelen smøres direkte på arret. Vent med å dekke til med tøy til gelen er tørket. Make-up kan brukes som vanlig når gelen er tørket.
- Ikke bruk silikongel under plasteret. Silikongel vil føre til at plasteret mister evnen til å feste seg til huden.
- Silikonplasteret brukes om igjen i inntil fire uker. Om plasteret blir skitten eller mister sin klebelighet, kan det vaskes lett i springvann med mild håndsåpe. Lufttørkes før man igjen legger det på. Rens arret og la det lufttørke før du setter plasteret på igjen. Det er ikke nødvendig å vaske plasteret hver gang før bruk. Skal plasteret tildekkes med stramt tøy, kan det være lurt å legge et tynt gasbind rundt plasteret for å unngå at det forskyves/løsner.
- Du vil kunne se resultater allerede etter 3 uker. Best resultat oppnås etter minimum 3 måneder.

## Studier:

### Traume



Før NewGel+

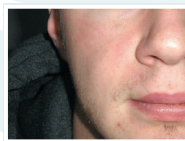


Etter 4 måneder med NewGel+

### Åpen hjertekirurgi



Før NewGel+

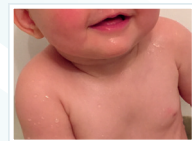


Etter 4 måneder med NewGel+

### Operasjon akilles




Før NewGel+

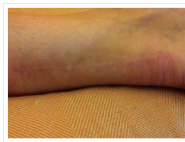

Etter 4 måneder med NewGel+

### Kreftkirurgi

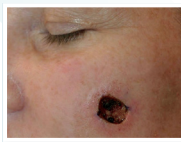

Før NewGel+



Etter 7 uker med NewGel+

# Produktoversikt

Beige

Transparent

Beige

Transparent



NG-101  
12,7x15,2 cm (1 pr box)



NG-301 ●



NG-140  
Øre (1 par pr box)



NG-340



NG-101S  
2,5x15k,2 cm (4 pr box)



NG-301s ●



NG-146  
Nese (1 par pr box)



NG-346



NG-120  
Sirkel (1 par pr box)



NG-320 ●



NG-164  
Mage 5,1 x 61 cm (1 pr box)



NG-364 ●



NG-126  
Anker (1 par pr box)



NG-326 ●



NG-160  
Operasjonssnitt 5,1 x 20 cm (2 pr box)



NG-360 ●



NG-124  
"Ispinne" (1 par pr box)



NG-324



NG-170  
Stor firkant 25,4 x 61 cm



NG-370



NG-180  
Dot 2,5 cm (6 stk pr box)



NG-380 ●



15 g NGO-800 ●  
NewGel+E Silikongel med vitamin E



30 g NGO-810 ●



15 g NGO-8015 ●  
NewGel+UV Silikongel m/ UV beskyttelse

● = Lagervare. Alle andre artikkelnr er bestillingsvare med leveringstid på ca 3-4 uker.

## MEDSTIM

Medestim Norge AS, Pb. 6631 Etterstad, 0607 Oslo  
www.medestim.no/forhandlere/