

Bruksanvisning – NewGel+ Silikonplaster

1. Produktbeskrivelse

NewGel+ silikonplaster er et medisinsk silikonbasert plaster for behandling og forebygging av arr. Plasteret er fleksibelt, gjenbrukbart og danner en beskyttende barriere som bidrar til å mykgjøre, flate ut og redusere synligheten av arr.

2. Bruksområde

Produktet er beregnet for behandling og forebygging av arr, inkludert hypertrofiske arr og keloider, etter kirurgi, brannskader eller andre hudskader.

3. Hvordan bruke produktet

- Sørg for at huden er ren og tørr før påføring.
- Klipp plasteret til ønsket størrelse om nødvendig.
- Fjern beskyttelsesfilmen og plasser plasteret over arret.
- Bruk plasteret i 12–24 timer per dag.
- Fjern plasteret daglig for rengjøring av hud og plaster.

4. Rengjøring

Vask plasteret daglig med mild såpe og lunkent vann. La det lufttørke før gjenbruk. Rengjør huden før plasteret påføres igjen.

5. Forsiktighetsregler

- Kun til utvortes bruk.
- Skal ikke brukes på åpne sår.
- Unngå kontakt med øynene.
- Ved hudirritasjon, reduser brukstiden eller avslutt bruken og kontakt helsepersonell.

6. Bivirkninger

Produktet er generelt godt tolerert. I sjeldne tilfeller kan mild hudirritasjon forekomme.

7. Oppbevaring

Oppbevares rent og tørt mellom bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.