

Bruksanvisning – NewGel+ Silikongel E

1. Produktbeskrivelse

NewGel+ silikongel er en medisinsk silikonbasert gel for behandling og forebygging av arr. Produktet danner en beskyttende film over huden og bidrar til å mykgjøre, flate ut og redusere synligheten av arr.

2. Bruksområde

Produktet er beregnet for behandling og forebygging av arr, inkludert hypertrofiske arr og keloider, etter kirurgi, brannskader eller andre hudskader.

3. Hvordan bruke produktet

- Sørg for at huden er ren og tørr før påføring.
- Påfør et tynt lag gel på det aktuelle området.
- La gelen tørke i noen minutter.
- Påfør to ganger daglig (morgen og kveld).

4. Rengjøring

Vask huden daglig med mild såpe og vann. Sørg for at huden er helt tørr før påføring av ny gel.

5. Forsiktighetsregler

- Kun til utvortes bruk.
- Skal ikke brukes på åpne sår.
- Unngå kontakt med øynene.
- Ved irritasjon, avslutt bruken og kontakt helsepersonell.

6. Bivirkninger

Produktet er generelt godt tolerert. I sjeldne tilfeller kan mild hudirritasjon forekomme.

7. Oppbevaring

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved romtemperatur, beskyttet mot direkte sollys.