

# Bruksanvisning – NewGel+ Silikongel UV

---

## 1. Produktbeskrivelse

NewGel+ silikongel er en medisinsk silikonbasert gel for behandling og forebygging av arr. Produktet danner en beskyttende film over huden og bidrar til å mykgjøre, flate ut og redusere synligheten av arr. Produktet inneholder også UV-beskyttelse som bidrar til å beskytte arret mot solens stråler.

## 2. Bruksområde

Produktet er beregnet for behandling og forebygging av arr, inkludert hypertrofiske arr og keloider, etter kirurgi, brannskader eller andre hudskader.

## 3. Hvordan bruke produktet

- Sørg for at huden er ren og tørr før påføring.
- Påfør et tynt lag gel på det aktuelle området.
- La gelen tørke i noen minutter.
- Påfør to ganger daglig (morgen og kveld).

## 4. Rengjøring

Vask huden daglig med mild såpe og vann. Sørg for at huden er helt tørr før påføring av ny gel.

## 5. Forsiktighetsregler

- Kun til utvortes bruk.
- Skal ikke brukes på åpne sår.
- Unngå kontakt med øynene.
- Ved irritasjon, avslutt bruken og kontakt helsepersonell.
- Produktet gir UV-beskyttelse, men bør ikke erstatte annen solbeskyttelse ved langvarig solesponering.

## 6. Bivirkninger

Produktet er generelt godt tolerert. I sjeldne tilfeller kan mild hudirritasjon forekomme.

## 7. Oppbevaring

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved romtemperatur, beskyttet mot direkte sollys.